

# Combat Application Tourniquet™


(brevetto in corso di registrazione)



Produzione e licenze: Composite Resources Inc.  
803.366.9700 www.composite-resources.com

Il C-A-T™ è fornito nella configurazione per l'applicazione con una mano sola. Si consiglia di conservarlo ripiegato in questa configurazione.

Lo trovate su:

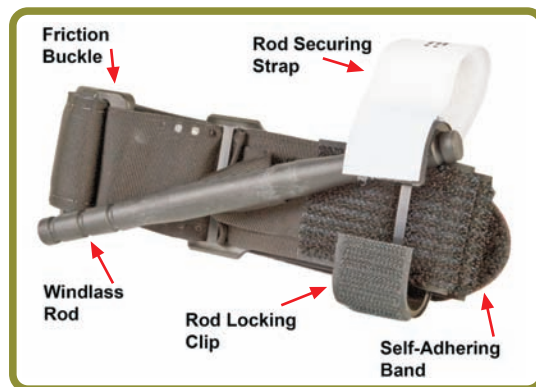

## Istruzioni per l'uso: applicazione **con due mani**

Passare la fascia attorno all'arto e infilarne la punta nella

**1**

fessura interna della fibbia. Stringere la fascia.



Passare la punta nella fessura esterna della fibbia.

**2**

La fibbia a frizione terrà la fascia bloccata.



Stringere **molto bene** la fascia e fissarla saldamente sul lato opposto.

**3**

Se la fascia è stata stretta correttamente non sarà possibile inserire più di tre dita tra quest'ultima e l'arto.



Girare l'asticella **fino all'interruzione dell'emorragia**

**4**

e alla scomparsa del polso distale.



Fissare l'asticella collocandola all'interno della molletta. **Controllare se sono ancora presenti emorragia e**

**5**

**polso distale.** Se l'emorragia non è ancora sotto controllo, applicare un secondo laccio emostatico vicino al primo e ricontrollare.



Con il laccio, fissare l'asticella all'interno della molletta.

**6**

Preparare il paziente per il trasporto e ricontrollare. Annotare l'ora dell'applicazione.



## Utilizzo della fibbia a frizione

Durante l'applicazione con due mani o quando *la fascia diventa sporca*, utilizzare la fibbia a frizione per tenere la fascia bloccata.

**1**

Passare la punta nella

fessura interna della fibbia. Stringere la fascia.



**2**

Passare la punta nella

fessura esterna della fibbia.



**3**


Stringere la fascia

e fissarla saldamente sul lato opposto.



# Istruzioni per l'uso: applicazione **con una mano sola**

Il C-A-T™ viene fornito nella configurazione per l'applicazione con una mano sola. Questa è la configurazione consigliata per il magazzino.

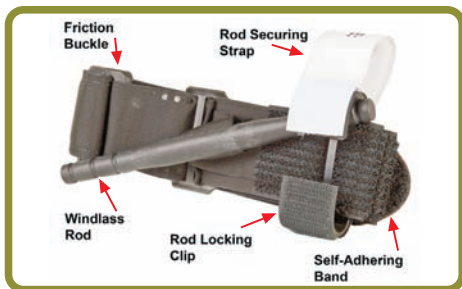

**2**

Stringere la fascia e fissarla saldamente sul lato opposto.



**4**

Girare l'asticella **fino all'interruzione dell'emorragia e alla scomparsa del polso distale.**



**6**

Passare la fascia sopra l'asticella, all'interno della molletta, e tutto intorno all'arto.



**1**

Inserire l'arto ferito attraverso l'anello formato dalla fascia.



**3**

Fare aderire la fascia attorno all'arto. Non oltrepassare la molletta dell'asticella.



**5**

Fissare l'asticella collocandola all'interno della molletta. **Controllare se sono ancora presenti emorragia e polso distale.**



**7**

Con il laccio, fissare l'asticella e la fascia. **Preparare per il trasporto e ricontrrollare.**



## Configurazione per l'applicazione **con una mano sola**

**1**

Passare la punta nella fessura interna della fibbia.

Tirare la fascia per 15 cm, ripiegarla e farla aderire su se stessa.



**2**

Appiattire l'anello formato dalla fascia.

Collocare la fibbia al centro della fascia appiattita.



**3**

Piegare il C-A-T a metà, collocando la fibbia ad una estremità.

Il C-A-T è pronto per essere riposto nel kit medico.



Phil Durango, LLC  
21899 Grandview Avenue  
Golden, CO 80401



Distribuito da:



**EC** **REP**

Mdi Europa GmbH  
Wittekamp 30  
D - 30163 Hannover

Via Agogna, 20  
28100 NOVARA (NO) - ITALY  
Tel. +39 0321 442441  
Fax +39 0321 392190  
E-mail: info@flamor.com

### AVVERTENZA: **PRODOTTO MONOUSO**

Questo prodotto è destinato ad essere utilizzato da professionisti sanitari esperti nell'applicazione di lacci emostatici. Il prodotto non è destinato al pubblico. Utilizzare solo secondo le istruzioni delle autorità di pronto soccorso o sotto la supervisione di un medico. Prima di utilizzare il prodotto, leggere per intero le Istruzioni per l'uso. Un'applicazione scorretta può causare lesioni gravi o la perdita dell'arto. L'utilizzo di qualsiasi laccio emostatico deve costituire **UN RIMEDIO DI ULTIMA ISTANZA** da applicare solamente quando è impossibile arrestare l'emorragia e il soggetto è in pericolo di vita.

### LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ:

Composite Resources, Inc. e relativi dipendenti, agenti, appaltatori, fornitori e distributori declinano ogni responsabilità per eventuali lesioni o danni derivanti dall'applicazione e dall'utilizzo del Combat Application Tourniquet™ (C-A-T™). Ogni rischio e responsabilità sono a carico dell'utilizzatore.