

www.flamor.com



NECKLITE

collare conformabile

Collare cervicale d'emergenza, conformabile realizzato in lamina di alluminio rivestita da schiuma di poliuretano ad alta densità. Questa particolare caratteristica costruttiva, rende il collare ripiegabile, arrotolabile e comunque permette di fargli assumere forma e dimensioni molto contenute e compatte, idonee all'inserimento in piccole borse, zaini e tasche. Una serie di piccole alette sono posizionate sotto il mento per potersi adattare alle dimensioni e morfologia di ogni singolo collo. Una volta applicato al paziente, il collare si irrigidisce a tal punto da immobilizzarlo saldamente.

**MISURA UNICA
SENZA REGOLAZIONI
APPLICA & MODELLA**

Tasche pantaloni



Piccole borse



Zaini



Vest



**COMPATTO - LEGGERO
RAPIDO - EFFICACE
RADIOTRASPARENTE
FACILE DA USARE**



Sottile



Conformabile



- Leggero e sottile, con spessore di mm 5, un'altezza di mm 180, e una lunghezza complessiva di mm 550.
- Chiusura con velcro nero alto cm 5.
- Una volta chiuso, presenta un foro ellittico nella parte posteriore per l'aerazione ed uno più grande di forma ovale nella parte anteriore per la tracheotomia. Una serie di alette conformabili sono posizionate in corrispondenza del mento, per meglio adattarsi alla forma del viso e del collo del paziente.



Radiotrasparente



Facile da identificare



Colori Militare:

Esterno: Grigio scuro (a bassa visibilità)

Interno: Grigio scuro (a bassa visibilità)

Colori Civile:

Esterno: Giallo - **Interno:** Grigio scuro

Peso e dimensioni:

Peso: 115 gr.

Larghezza: 550 mm

Altezza: 180 mm

Spessore: 5 mm



Colori Pediatrico:

Esterno: Blu

Interno: Grigio scuro


Peso e dimensioni:

Peso: 75 gr.


Larghezza: 440 mm

Altezza: 144 mm


Spessore: 5 mm

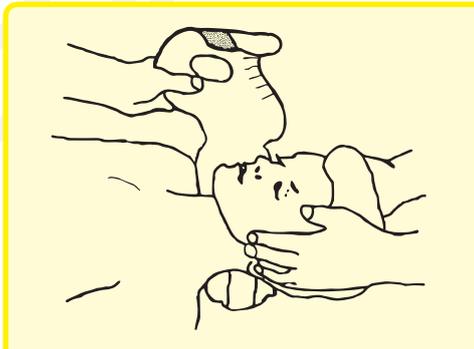

Inserire la parte con foro ellittico posteriore sotto la nuca, dietro al collo, sino a poterlo afferrare dalla parte opposta.

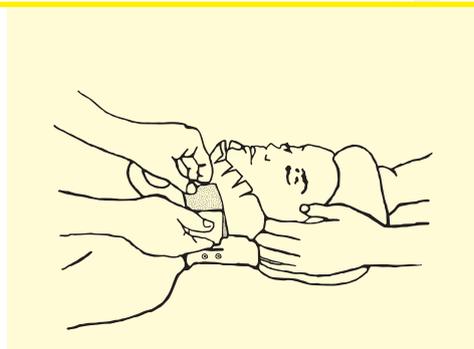

Cingere la parte anteriore intorno alla mandibola, allineando il foro ovale al mento. Far aderire bene il collare, tirare il velcro e serrarlo.

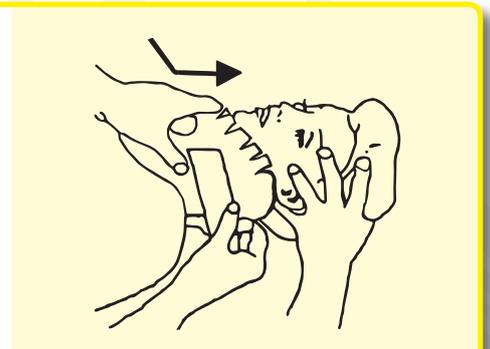

Spingere le alette contro il mento e verificare che lo sostengano. Stringere il collare fino a che aderisca bene al collo del paziente e chiudere il velcro.



Via Biandrate, 80 - 28060 SAN PIETRO MOZZO (NO) - ITALY
Tel. +39 0321 442441 - Fax +39 0321 392190 - E-mail: info@flamor.com